

CHECKLIST GEBRUIK ACTIEVE TILLIFT

Medewerker :

Datum :

Algemeen	Voldaan
Werking accu (wanneer en hoe opladen)	
Werking noodstop	
Waar ligt protocol	
Waar is reserve-accu	
Storingsmelding (wanneer, waar)	

Vorbereiding	Voldaan
Lift in orde (accu vol genoeg, noodstop niet ingedrukt)	
Bewegingsprotocol bekend	
Goede band	
Rolstoel / bed goed bereikbaar	
Voldoende ruimte transfer	

Voorlichting cliënt	Voldaan
Wordt aan de cliënt verteld wat er gaat gebeuren	
Vragen of de cliënt naar voren komt zitten of helpt	

Bevestigen tilband	Voldaan
Tillift in goede positie (voor-zijkant, poten open)	
Stand van het juk	
Clips goed vast	
Eigen houding (handelen op de plaats waar je moet zijn)	

Tillen uit bed/stoel	Voldaan
Bed laten zakken	
Stoel achterover kantelen (indien mogelijk)	
Controle rem (niet gebruiken)	
Controle vastzitten clips (band op spanning brengen)	
Controle tilband (borstfixatie, band op goede hoogte)	

Rijden met de tillift	Voldaan
Poten in (onderstel zo smal mogelijk)	
Veranderen van richting door met 1 voet het onderstel te "sturen"	
Gebruik eigen lichaamsgewicht	
Rustig rijden	
Traject zo kort mogelijk	

Tillen in bed/stoel	Voldaan
Stoel/bed op de rem	
Beensteunen stoel verwijderd	
Positie in bed (hoog genoeg)	
Goed achter in de stoel	

Afronding	Voldaan
Clips losmaken	
Lift opzij zetten	
Indien nodig: Riem vast	
Band en lift op afgesproken plaats terug	