

## CHECKLIST GEBRUIK PASSIEVE TILLIFT

Medewerker :

Datum :

<b>Algemeen</b>	<b>Voldaan</b>
Werking accu (wanneer en hoe opladen)	
Werking noodstop	
Waar ligt protocol	
Waar is reserve-accu	
Storingsmelding (wanneer, waar)	

<b>Vorbereiding</b>	<b>Voldaan</b>
Lift in orde (accu vol genoeg, noodstop niet ingedrukt )	
Bewegingsprotocol bekend	
Goede band	
<b>BALEINEN !!!</b>	
Rolstoel / bed goed bereikbaar	
Voldoende ruimte transfer	

<b>Voorlichting cliënt</b>	<b>Voldaan</b>
Wordt aan de cliënt verteld wat er gaat gebeuren	
Vragen of de cliënt naar voren komt zitten of helpt	

<b>Bevestigen tilband</b>	<b>Voldaan</b>
Tillift in goede positie (voor-zijkant, poten open)	
Stand van het juk	
Clips goed vast	
Beenslips niet gedraaid	
<b>BALEINEN !!!</b>	
Eigen houding (handelen op de plaats waar je moet zijn)	

<b>Tillen uit bed/stoel</b>	<b>Voldaan</b>
Bed laten zakken	
Stoel achterover kantelen (indien mogelijk)	
Controle rem ( <b>niet gebruiken</b> )	
Controle vastzitten clips (band op spanning brengen)	

Controle tilband (beenslips, plooiën)	
Kantelen juk naar ligpositie	

<b>Rijden met de tillift</b>	<b>Voldaan</b>
Poten in (onderstel zo smal mogelijk)	
Veranderen van richting door met 1 voet het onderstel te "sturen"	
Gebruik eigen lichaamsgewicht	
Rustig rijden	
Traject zo kort mogelijk	

<b>Tillen in bed/stoel</b>	<b>Voldaan</b>
Stoel/bed op de rem	
Beensteunen stoel verwijderd	
Stoel achterover kantelen (indien mogelijk)	
Stand van het juk (lig/zit)	
Positie in bed (hoog genoeg)	
Goed achter in de stoel	

<b>Afronding</b>	<b>Voldaan</b>
Clips losmaken	
Lift opzij zetten	
Indien nodig: <b>Riem vast</b>	
Band en lift op afgesproken plaats terug	